



# Qufora® IrriSedo Klick

## Gebruiksaanwijzing

Met een controle unit die in **4 eenvoudige stappen** veel comfort biedt

Het systeem werkt door de controle unit stap voor stap met de klok mee te draaien



Gebruik zwaartekracht of pomp om de slangen, pomp en katheter met water te vullen. Dit ontluicht het systeem.



Wanneer de katheter is ingebracht, gebruik de pomp om de ballon te vullen waardoor er een waterdichte afsluiting ontstaat



Gebruik zwaartekracht om water in de darm te laten stromen. Indien nodig gebruik de pomp voor extra waterdruk.



De ballon zal leeglopen en de katheter kan verwijderd worden.



*Draaien naar een stip pauzeert het systeem en stopt het stromen van water.*

Voor de uitgebreide instructie animatie over het gebruik van het Qufora Irrisedo Klick systeem in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch verwijzen wij u graag naar onze website [www.medical4you.nl](http://www.medical4you.nl)




# Gebruiksaanwijzing


## Qufora® IrriSedo Klick

### Irrigatiesysteem met ballonkatheter

▼

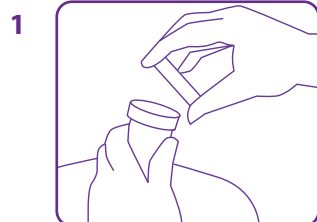


**1** Vul de waterzak met de hoeveelheid lauwwarm water die geadviseerd is door uw zorgverlener. Gebruik 300ml extra om het systeem gebruiksklaar te maken.

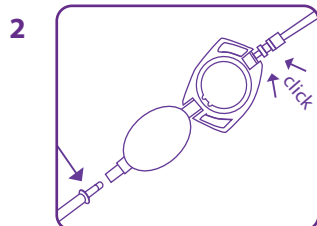


**2** Verbind de waterzak met de pomp. Verbind de klick-slang met de controle unit.




**3** Verbind de andere kant van de klick-slang met de rectaal katheter.

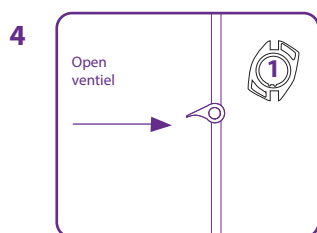

**4** Draai de controle unit naar stand 1. Open het ventiel van de waterzak.

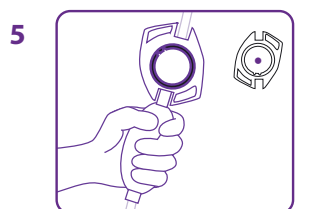


**5** Houdt de handpomp met controle unit naar boven gericht, totdat er water uit de rectaal katheter stroomt. Zorg ervoor dat de handpomp geheel gevult is met water. Alle lucht is hierdoor uit het systeem. De stip tussen 1 en 2 pauzeert het systeem.

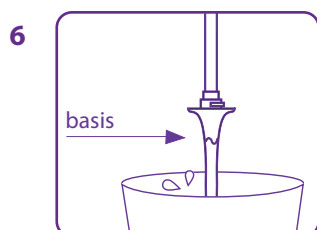


**6** Dompel de katheter in water tot aan de basis; deze is nu meteen glad en klaar voor gebruik.


▼

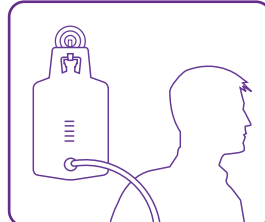


**7** Hang of plaats de waterzak rond schouderhoogte in een zittende positie. U kunt nu de irrigatie starten, gebruikmakend van de zwaartekracht. Indien nodig gebruik de pomp voor extra waterdruk.

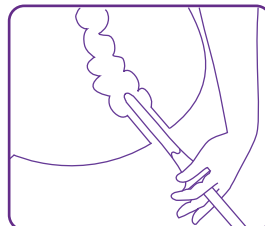


**8** Neem plaats op of boven het toilet. Bevestig de controle unit eventueel met de Velcro beenbanden. Breng de rectaal katheter voorzichtig in, in het rectum.

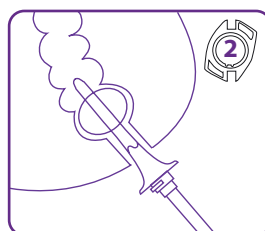


**9** Draai de controle unit naar stand 2 en pomp water in de ballon van de rectaal katheter, 1-2 keer inknippen is meestal voldoende. Raadpleeg uw zorgverlener.

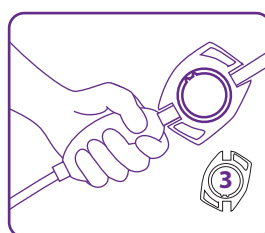

**10** Draai de controle unit verder naar stand 3 en laat het water, bij voorkeur door de zwaartekracht, in de darm stromen. Gebruik de pomp eventueel om wat extra waterdruk te geven. Waterstroom stoppen of pauzeren, draai naar een stip.

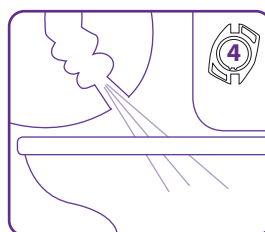

**11** Draai de controle unit naar stand 4 en sluit het ventiel. De ballon van de katheter zal leeglopen en de katheter kan voorzichtig uit het rectum verwijderd worden.

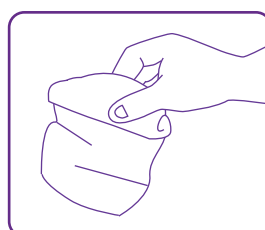

**12** Ontkoppel de katheter in het grijze zakje door op de paarse knop te drukken. Het grijze zakje kan nu omgevouwen en dichtgeplakt worden. Daarna weggoeien met het huishoudelijk afval.

**Reinigen en opbergen**, verwijder al het water uit de onderdelen. Reinig de buitenkant van het systeem met water (milde zeep). Berg het systeem op in een droge ruimte, vermijd direct zonlicht en hitte. Was en droog uw handen.