

Qufora® IrriSedo MiniGo

Beknopte handleiding.



- 1 Handpomp
- 2 Conus met hydrofiele coating
- 3 Conuszakje
- 4 Doos



Lees de gebruiksaanwijzing in de doos zorgvuldig door voordat u begint.

Neem bij twijfel contact op met uw arts of verpleegkundige voor hulp bij uw begeleiding door het proces.

Gedistribueerd door
Medical4You B.V.
Wilhelminalaan 41
6641 DE Beuningen


Tel: +31 (0) 24 - 6750925
info@medical4you.nl
www.medical4you.nl

Qufora® is een geregistreerd handelsmerk van Qufora A/S. ©03/2021.
Alle rechten voorbehouden Qufora A/S, 3450 Allerød, Denemarken.


 **Qufora®**
Your life. Our inspiration.

0302_NL_T70321-01

Hoe Qufora IrriSedo MiniGo te gebruiken

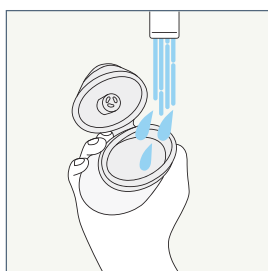


- 1** Was en droog uw handen. Open het deksel. De handpomp met open deksel onder de kraan houden en tot de binnenrand vullen met lauw kraanwater (36-38°C).

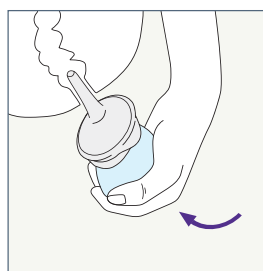

- 6** Ga op de wc zitten of hang boven de wc. Breng voorzichtig de conus tot aan de basis in het rectum.




- 2** Als de handpomp tot de binnenrand gevuld is, houd de handpomp vast aan het bovenste gedeelte en sluit het deksel totdat u een klik hoort. Zorg ervoor dat wanneer u het deksel sluit dat beide zijanten (door erop te drukken) van het deksel goed dicht zijn.

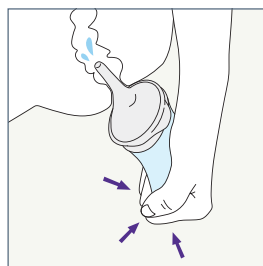


- 7** De conus is nu in de juiste positie. Knijp nu voorzichtig in de handpomp om water in het rectum te brengen. In de handpomp kan meerdere keren geknepen worden om water in te brengen.




- 3** Open het zakje van de conus aan de geperforeerde lijn. Met de conus nog in het zakje, de conus stevig op de kleine ronde opening van het deksel drukken om het geheel in elkaar te zetten.

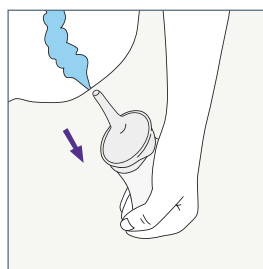

- 8** Verwijder de conus uit het rectum. Fecale materie en water vallen in de wc.

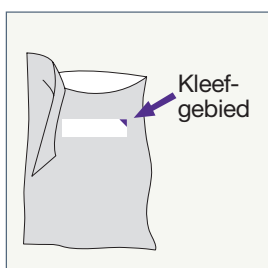


- 4** Bevestig het lege zakje aan een oppervlak gebruikmakend van het kleefgebied aan de achterkant van het zakje.

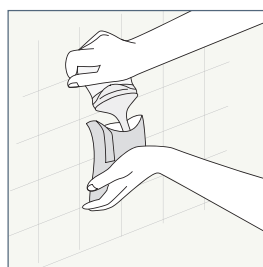

- 9** Plaats de gebruikte conus in het zakje en scheid de twee delen.



- 5** Om de hydrofiele coating op de conus te activeren, de conus met water nat maken tot aan de basis. Knijp zachtjes in de handpomp, totdat er water uit de conus komt, om te ontlichten. Het is nu klaar voor gebruik.

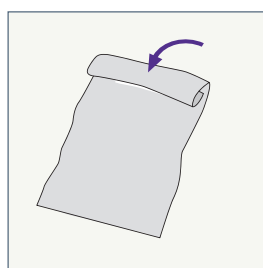

- 10** U kunt het zakje vouwen en sluiten met behulp van het kleefgebied. Daarna weggooien met het huishoudelijke afval. De conus is uitsluitend voor eenmalig gebruik en mag niet worden hergebruikt.

Reiniging en opslag

Verwijder eventueel achtergebleven water uit de handpomp. Maak de buitenkant van de handpomp schoon met lauw water en een milde zeep. Afspoelen en drogen. Berg de handpomp op met het deksel open, uit direct zonlicht en in een droge en geventileerde ruimte tussen 0 en 30°C. Was en droog uw handen.



Raadpleeg vóór gebruik altijd het document 'Gebruiksaanwijzing' dat bij het product wordt geleverd