



- 1 In elke verpakking zit een extra connector om de afvoerslang naar wens in te korten
- 2 Knip de slang van 130cm eventueel op de gewenste lengte
- 3 Fixeer de extra connector aan de ingekorte slang



- 1 Hefboomkraan met één hand eenvoudig te openen
- 2 Hefboomkraan makkelijk en hygiënisch op te bergen
- 3 Bevestiging slang aan de bedhanger



- 1 Filter
- 2 Het opbergen van de slang van de urinebedzak overdag
- 3 Bevestiging urinebedzak aan urine compartimenten beenzak

- ↖ 1 Aansluiting
- ↷ 2 Hefboomkraan open