



## Gebruiksaanwijzing



# Qufora® IrriSedo MiniGo

## Verlengslang



Qufora A/S  
Gydevang 28-30  
3450 Allerød  
Denmark

Tel: +45 88 300 592  
info@qufora.com  
www.qufora.com




Qufora® is een geregistreerd handelsmerk van Qufora A/S. ©04/2024.  
Alle rechten voorbehouden Qufora A/S, 3450 Allerød, Denemarken.


# Gebruiksaanwijzing

De verlengslang van de Qufora Irrisedo MiniGo is een verlengslang die als accessoire geleverd kan worden wanneer u een beter bereik wilt krijgen gedurende de irrigatie.

Verlengslang

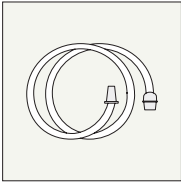

In elkaar gezet met Qufora Irrisedo MiniGo

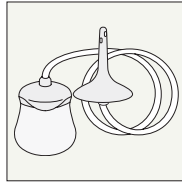

De verlengslang is voor eenmalig gebruik

De verlengslang wordt gebruikt om de conus met de handpomp te verbinden.

Bij het in elkaar zetten van de Qufora Irrisedo MiniGo met de verlengslang, sluit eerst de verlengslang aan op de handpomp. Verbind vervolgens het andere uiteinde van de verlengslang met de conus.

Volg tijdens gebruik a.u.b. de instructies zoals beschreven in de Qufora Irrisedo MiniGo gebruiksaanwijzing welke te vinden is in de Qufora Irrisedo MiniGo doos.

Haal na gebruik de verlengslang van de handpomp. Doe de verlengslang en de conus in het afvalzakje (beiden zijn voor eenmalig gebruik). Met behulp van het kleefgebied kan het zakje dichtgevouwen worden. Gooi daarna beiden weg met het huishoudelijk afval.

---

**Opmerking:** gebruik a.u.b. Qufora Irrisedo MiniGo met de verlengslang zoals geadviseerd door uw arts of verpleegkundige.